

HEAVY LEGS TERAPEUTISKA SULOR

Stimulerar blodcirkulationen med varje steg

TREFALDIG VERKAN:

- ▶ Åtgärder mot tunga ben
- ▶ Lindrar smärtsamma ben
- ▶ Dämpar känningar av svullnad

INDIKATIONER: Användningen av EPITACT®s HEAVY LEGS-sulor rekommenderas för personer med cirkulationsrubbingar i underbenen, venös insufficiens eller åderbräck.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING: Sulorna är tunna och lätta att ta på och passar alla stängda skor med en klack på upp till 1 tum. Använd inte med eller i stället för dina ortopediska sulor. De är kompatibla med, men ersätter inte, mediciner och/eller medicinsk kompressionsutrustning. Anpassa sulorna till din skostorlek vid behov. Om de rör sig i dina skor, använd de hållkuddar som medföljer i förpackningen: Klistra fast den svarta sidan på undersidan av innersulan på de ställen som anges ovan.


KONTRAINDIKATIONER: Använd inte på skadad hud. Vid arterit, flebit, diabetes, neuropati i nedre extremiteterna eller allergi mot någon av komponenterna: rådföras sjukvårdspersonal och övervaka din fot under användning.

SKÖTSELRÅD: Ta ut sulorna ur skorna efter användning. Tvätta dem regelbundet för hand med tvål och vatten. Vi rekommenderar att du tvättar dem efter varje användning. Om det efter en tids användning uppstår tecken på slitage (revor) ska sulorna bytas ut.

SAMMANSÄTTNING: 80,5% SEBS, 19,5% PP, silikon.

De använda materialen har godkänts vid smärta eller annan ovanlig reaktion, kontakta läkare. Alla allvariga incidenter relaterade till denna produkt måste rapporteras till Millet Innovations laboratorium och tillrelevant hälsomyndighet. Ursprunglig CE-märkning: 01/2023.

AINUTLAATUINEN MUOTOILU*, JOLLA ON VÄLITÖN VAIKUTUS JALKAPOHJEN LIHASPUMPUUN

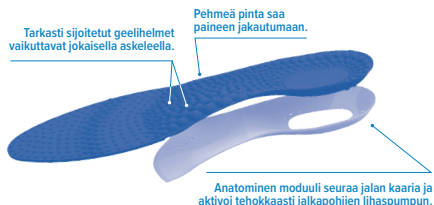


* Patenti rekisteröity 15.10.2022



TERAPEUTISKA INNERSULOR:

De förbättrar effektiviteten i det venösa kretsloppet och avlastar dina tunga ben genom att aktivera den plantara venösa pumpen vid varje steg.

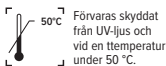

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.



MILLET
INNOVATION

www.epitact.se

NT9602ND
07/2023